

# CLASSIC-CHECK® REVISIÓN DE SERVICIO

## INSTALACIÓN APROPIADA DEL SISTEMA CLASSIC-CHECK, USADO EN UNA CAMA CON LA COLCHONETA SENSORMAT®

(Consulte también el manual del usuario Classic-Check para cambios de instalación)



**A.** Saque el Sensormat de la bolsa de plástico. Ponga una banda elástica con clip y engánchela a cada extremo del Sensormat. Este paso importante mantendrá el Sensormat en la posición correcta sobre el colchón, para asegurar su estabilidad. El Sensormat funcionará con cualquier lado hacia arriba.



**B.** Asegúrese de que todas las sábanas y ropa de cama estén recogidas hasta los pies de la cama. Ponga el Sensormat de 3 a 5 pulgadas por debajo del borde del colchón.



**C.** Enganche los clips en la tela del colchón, borde del colchón, o los resortes de la cama a ambos lados. Ahora puede acomodar de nuevo las sábanas y ropa de cama. Anote en la etiqueta del cordón, la fecha en que comenzó a usar el Sensormat.



**D.** Conecte el Sensormat en la unidad de control de Classic-Check.

**IMPORTANTE:** Use solamente Sensormat manufacturado por Bed-Check con la unidad de control Classic-Check.



**E.** Enchufe la unidad Classic-Check.



**F.** Si será conectado con el sistema de llamados de enfermera (opcional), conecte el cordón de llamados de enfermera, directamente en el punto de contacto de llamados de enfermera de la institución.



**G.** Para asegurarse de que esta unidad esté fuera del alcance del paciente/residente, fije la unidad de control Classic-Check al marco de la cama, utilizando la cinta Velcro®, o a la cabecera de la cama, usando una funda opcional de alambre.



**H.** Ayude al paciente/residente a acostarse en la cama. La unidad de control se activará automáticamente. La luz amarilla de Pausa contará regresivamente 5 segundos y sonará un tono una vez, a medida que la luz verde del monitor se enciende. Usted puede saltarse los 5 segundos oprimiendo el botón de Reprogramación una vez.



**I.** Cuando el paciente/residente intente bajarse de la cama, una alarma sonará en el cuarto y en la estación de enfermeras, si ha sido conectada como en el paso F de arriba. Presione el botón de Reprogramación una vez para cancelar la alarma. Asegúrese de Reprogramar la estación de llamadas a la enfermera en el cuarto del paciente/residente.

**J.** Para bajar al paciente de la cama, presione el botón de Reprogramación. La unidad entrará en el Modo de Espera por 25 segundos (la luz amarilla parpadeará). A los 25 segundos sin nada de peso, en el Sensormat, la unidad comenzará el modo de Espera permanente (luz amarilla constante).



**K.** Si a los 25 segundos el paciente sigue encima de la colchoneta Sensormat, Classic-Check comenzará a vigilar otra vez (luz verde constante). PAUSA PERMANENTE o MONITOR: Siempre que haya peso en el Sensormat, usted puede cambiar el modo rápidamente, de Monitor a Pausa, o de Pausa a Monitor, solo presionando el botón de Reprogramación. **Asegúrese siempre de que la luz verde del monitor esté prendida, antes de dejar al paciente/residente solo.**

**STANLEY**



P.O. Box 80238, Lincoln, NE 68501

1-800-523-7956 • [www.bedcheck.com](http://www.bedcheck.com)

**IMPORTANTE:** Revise la efectividad del sistema diariamente y/o al cambio de turno. Asegúrese siempre de que el Sensormat, esté en la posición correcta, cada vez que suene una alarma. Use únicamente los productos Bed-Check para mantener la garantía y la compatibilidad del sistema. Las características físicas, los hábitos y factores que ponen a los pacientes en riesgo de caídas varían y pueden cambiar día a día. Por favor analice estos factores cuando sea necesario.