

REPASO DEL USO DEL BASIC-CHECK® CUANDO SE USA CON EL SENSORMAT® (BANDA DE SENSOR) DE CAMAS

(Consulte también la guía del usuario de Basic-Check)


INSTALACIÓN CORRECTA DEL SISTEMA BASIC-CHECK EN UNA CAMA



A. Remueva la bolsa plástica del Sensormat. Coloque una banda elástica y engánchelo a cada extremo del Sensormat. Este paso importante permite que el Sensormat se mantenga en la posición correcta sobre el colchón para asegurar el correcto funcionamiento. El Sensormat funciona con cualquier lado hacia arriba.



B. Asegúrese que todas las sábanas y cobertores estén puestos hacia el pie de la cama. Coloque el Sensormat 3 a 5 pulgadas más abajo del doblez del colchón.

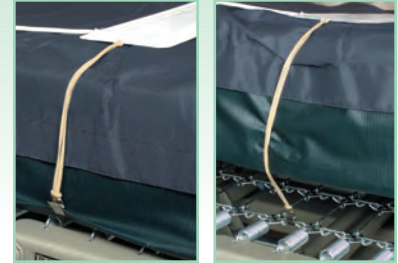

C. Enganche las pinzas tipo caimán a la tela del colchón, borde del colchón o a los resortes de la cama por ambos lados. Ahora puede volver a poner las sábanas y los cobertores.

En la etiqueta del cordón coloque la fecha en que empezó a usar el Sensormat.



D. Enchufe el conector tipo teléfono del Sensormat en la unidad de control del Basic-Check.

IMPORTANTE: Para evitar los problemas de funcionamiento que ya se han presentado al usar sensores que se venden como "equivalentes" y que son de inferior calidad, utilice los Bed-Check Sensormats sólo on el Basic-Check.



E. Para asegurar que la unidad no esté al alcance del paciente o residente, enganche la unidad de control Basic-Check al marco* o a la cabecera de la cama usando un colgador de alambre o Velcro® en la parte de atrás.

* Para evitar daños por orina, no lo coloque directamente debajo del doblez del colchón.



F. Ayude al paciente o residente a acostarse en la cama. La unidad de control se activará automáticamente. Sonará una vez para indicar que está monitoreando. Los últimos modelos de estas unidades tienen un indicador de luz LED en la parte frontal que también titilará para indicar que está vigilando.



G. Cuando el paciente o residente intente bajarse de la cama, sonará una alarma en la habitación. Para apagar la alarma presione el botón RESET o de reinicio una vez. La unidad empezará a vigilar automáticamente cuando el paciente regrese a la cama.

H. Para retirar al paciente de la cama, primero ayúdelo a levantarse, permitiendo que la alarma del Basic-Check se active. Presione el botón RESET una vez, dejando el Basic-Check en estado de espera. Debido al peso, el monitoreo del Sensormat se reiniciará automáticamente cuando el paciente regrese a la cama.

IMPORTANTE:

- Verifique diariamente la efectividad del sistema y/o cada vez que haya cambio de turno.
- Verifique la posición del Sensormat cada vez que suene la alarma.
- Para mantener la garantía del Bed-Check y asegurar la compatibilidad del sistema, sólo use productos Bed-Check.
- Las características físicas, hábitos y factores que hacen a cada paciente tener riesgo de caídas son diferentes y pueden variar diariamente. Por favor reevalúe según las necesidades.
- El Basic-Check sólo tiene una alarma audible. Para usarlo con el sistema de llamado a enfermeras, consulte con Bed-Check sobre otros sistemas.



P.O. Box 80238 • Lincoln, NE 68501
1-800-523-7956 • www.bedcheck.com