

# MODEL Vr REVISIÓN DE SERVICIO

## Para Servicios de CAMA

(Consulte el Manual de Programación y de Usuario del MODEL Vr ACCESS™)

### INSTALACIÓN APROPIADA DEL SISTEMA MODEL Vr



**A.** Saque el Sensormat® de la bolsa de plástico. Ponga una banda elástica con clip y engánchela a cada extremo del Sensormat. Este paso importante mantendrá el Sensormat en la posición correcta sobre el colchón, para asegurar su estabilidad. El Sensormat funcionará con cualquier lado hacia arriba.



**B.** Asegúrese de que todas las sábanas y ropa de cama estén recogidas hasta los pies de la cama. Ponga el Sensormat de 3 a 5 pulgadas por debajo del borde del colchón.



**C.** Enganche los clips en la tela del colchón, borde del colchón o los resortes de la cama a ambos lados. Ahora puede acomodar de nuevo las sábanas y ropa de cama. Anote en la etiqueta del cordón, la fecha en que comenzó a usar el Sensormat.



**D.** Enchufe el Sensormat, el cordón eléctrico y el cordón de llamadas de enfermera en los lugares correspondientes de la unidad de control del Model Vr. **IMPORTANTE:** Use solamente Sensormat manufacturado por Bed-Check® con la unidad de control del Model Vr.



**E.** Enchufe el Model Vr.

**F.** Enchufe el cordón de llamadas de enfermera en el punto de contacto de llamadas de enfermera de la institución.  
NOTA: Quizás sea necesario usar un adaptador.



**G.** Para asegurarse de que esta unidad esté fuera del alcance del paciente/residente, fije la unidad de control Model Vr, al marco de la cama utilizando una cinta Velcro®, o a la cabecera de la cama usando una funda de alambre opcional. \*No la ponga directamente debajo del borde de la cama, para evitar que se dañe con la orina.



**H.** Ayude al paciente/residente a acostarse. La unidad Model Vr, se activará automáticamente. La luz amarilla de Pausa parpadeará varias veces y después aparecerá la luz verde del Monitor. Se puede saltar la Pausa y cambiar directamente al modo del Monitor presionando el botón de Reprogramación una vez.



**I.** Cuando el paciente/residente intente levantarse de la cama, sonará una alarma en el cuarto y en la estación de enfermeras. Presione el botón de Reprogramación una vez para cancelar la alarma. Asegúrese de reprogramar el botón de llamadas de enfermera en el cuarto del paciente/residente.



**J.** Para sacar al paciente/residente de la cama, presione el botón de Reprogramación del Model Vr una vez. La unidad cambiará al modo de Pausa por 25 segundos (luz de Pausa parpadeará). Si el paciente se levanta de la cama durante este tiempo, la unidad cambiará al modo de Pausa normal (luz de Pausa encendida).



**K.** Si el paciente/residente no se ha levantado antes de 25 segundos, la unidad de control cambiará al modo del Monitor. Oprimiendo el botón de Reprogramación la unidad entrará otra vez en el modo de Pausa.

#### IMPORTANTE:

Revise la efectividad del sistema diariamente y/o al cambio de turno. Asegúrese siempre de que el Sensormat esté en la posición correcta, cada vez que suena una alarma. Use únicamente los productos Bed-Check para mantener la garantía y la compatibilidad del sistema.

Las características físicas, los hábitos y factores que ponen a los pacientes en riesgo de caídas varían y pueden cambiar día a día. Por favor analice estos factores cuando sea necesario.



P.O. Box 80238, Lincoln, NE 68501 • 1-800-523-7956 • www.bedcheck.com